

B 60

Desinfektionstücher



Produktinformation

Anwendungsbereich

B 60 Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige alkoholhaltige Desinfektionstücher. Sie eignen sich besonders für die gleichzeitige Desinfektion und Reinigung der Oberflächen von Medizinprodukten wie Behandlungseinheiten, medizinische Geräte, etc. in allen Funktionsbereichen im Krankenhaus wie beispielsweise Operationsabteilungen, Intensivstationen, Ambulanzen, Zentralsterilisationen, Diagnostikeinheiten mit operativen Eingriffen, bei Rettungsdiensten, in Pflegeeinrichtungen (Altenheime, etc.), in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und allen anderen Bereichen, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist.

Produktvorteile

- Praktische Desinfektionstücher mit vielfältigen Einsatzzwecken.
- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum Bakterien, Pilze und eine Vielzahl von Viren (begrenzt viruzid gegen behüllte Viren wie Vaccinia-Viren, BVDV inkl. HBV, HCV und HIV sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Polyoma-Viren SV 40, Noro-Viren).
- VAH/DGHM-gelistet. ÖGHMP-Expertenverzeichnis. IHO Viruzidie-Liste. Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476.
- Praktische einfache Anwendung und Entnahme aus der Spenderbox
- Auch als Nachfüllpackung erhältlich.
- Für die schnelle Zwischendurchdesinfektion.
- Besonders angenehmer Geruch - mit Zitronenfrische.

Mikrobiologische Wirksamkeit

B 60 zeigt folgende Leistungsmerkmale:

Anwendung	Zeit
Flächendesinfektion (nach VAH/DGHM)	15 Sek.
Bakterien und Pilze ²⁾	15 Sek.
MRSA ³⁾	15 Sek.
Tb-Bakterien, geringe Belastung	15 Sek.
Vaccinia-Viren, BVDV inkl. HBV; HCV und HIV ⁴⁾	30 Sek.
Adeno-Viren	30 Sek.
Polyoma-Viren SV 40 ⁵⁾	5 Min.
Noro-Viren ⁶⁾	1 Min.

¹⁾ Prüfung an *Candida albicans*.

²⁾ Wirksamkeit gegen Bakterien schließt Wirksamkeit gegen MRSA ein.

³⁾ Gemäß RKI-Empfehlung (Bundesgesundheitsbl. 47, 62- 66, 2004).

⁴⁾ Ohne Belastung; mit Belastung 100 %/15 Min.

⁵⁾ Prüfung am Surrogatvirus MNV.

Anwendung

Desinfektionstücher B 60 einzeln entnehmen, zu desinfizierende Oberflächen abwischen und Präparat einwirken lassen. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH/DGHM nur 15 Sekunden. Nach Entnahme eines Tuches Dose sofort wieder verschließen.

Hinweise

Bei alkoholempfindlichen Materialien wie beispielsweise Acrylglas oder lackierten Oberflächen ist die Beständigkeit gegenüber B 60 im Einzelfall zu prüfen.

Produktzusammensetzung

B 60 enthält eine schnell wirkende Kombination von Alkoholen sowie Hilfsstoffe in wässriger Lösung. 1 Tuch enthält 0,72 g 1-Propanol, 0,58 g Ethanol, Hilfsstoffe, Citral, Limonene, Wasser.

Packungsgröße

- 12 Dosen mit je 110 Tüchern im Karton
- 12 Nachfüllpackungen mit je 110 Tüchern im Karton
- 1 Dose + 2 Nachfüllpackungen mit je 110 Tüchern im Karton

Haltbarkeit

3 Jahre

Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht für längere Zeit unter -5°C lagern.

Bitte wenden

Toxikologie • Ökologie • Gefahrenhinweise • Gutachten



Physikalische Daten

Wirkstofflösung:

Aussehen:	klare, farblose, niedrigviskose Lösung
Dichte:	$D = 0,89 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)
pH-Wert:	$5,5 \pm 0,5$
Temperaturstabilität:	zwischen 0 und +40°C

Toxikologie

Die akute Toxizität (LD₅₀ Ratte, oral, dermal) ist > 2000 mg/kg Körpergewicht. Damit ist B 60 als "nicht toxisch" einzustufen. B 60 hat weder sensibilisierende noch hautreizende Eigenschaften. Bei Berührung mit den Schleimhäuten des Auges ist das Präparat als nicht reizend anzusehen. Unter normalen Anwendungsbedingungen besteht kein Inhalationsrisiko.

Ökologie

Die Wirkstofflösung von B 60 ist biologisch leicht abbaubar gemäß OECD-Richtlinie 301 D. Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit sowohl stofflich als auch thermisch verwertbar.

Gefahrenhinweise

Leichtentzündlich. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Unabhängige Gutachten – Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

CE 0124

B 60 sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen", die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro® Hygienesystems

Instrumentendesinfektion • Desinfektion von Flächen und Inventar • Desinfektion und Pflege von Händen und Haut • Spezialanwendungen • Zubehör

Stand der Information 2011-12